

**PROGRAMMÜBERSICHT UND BEHANDLUNGSBEISPIELE**

<b>Programm</b>	<b>Wirkung</b>	<b>Anwendung bei</b>
P 1 Einzelfrequenz 10 Hz	+ Lymphabfluss + Anregung der Matrix	+ Grundprogramm zum Ausleiten + Ödem, nach Operation und Traumen
P 2 Breitbandiges Frequenzspektrum 8-12-8 Hz	+ Endsorgung der Stoffwechselprodukte + Förderung des venösen Abflusses +Aktivierung der Matrix	+ entzündliche Erkrankungen allgemein + Schmerzen im Muskel-, Nerv-, Bindegewebe und Gelenkapparat + postoperative und posttraumatische Zustände des Bewegungssystems
P 3 Einzelfrequenz 18 Hz	+ Hyperämie + Förderung des arteriellen Zuflusses + Stoffwechselaktivierung	+ Gelenkmobilisation + Behandlung von Kontrakturen
P 4 Breitbandiges Frequenzspektrum 18-24-18 Hz	+ Detonisierung der Gewebeanspannung von Haut, Muskeln, Sehnen und Nerven + Ausleitung von Stoffwechselprodukten	+ Dehnung von Muskeln, Sehnen, Gefäßen und Nerven + Lösen von Verklebungen, Muskelverspannungen, Myotendinosen + Behandlung an Triggerpunkten + Einziehungen, Narben + Muskelverletzungen
P 5 Frequenzfolge 24-28 Hz	+ Tonisierung + Schmerzlinderung + Mobilisation und Vergrößerung des Bewegungs Raumes (z.B. Schrittlänge) + Aufbau und Steigerung der Muskelkraft + Optimierung des nervalen Reizsystems	+ Mobilisation von Gelenken + Verbesserung der Koordination und Kraftaufbau + Verbesserung von muskulären u. arthrogenen Dysbalancen + zentrale u. periphere Paresen + Lähmungen + Verbesserung der Koordinationsfähigkeit

<b>Programm</b>	<b>Wirkung</b>	<b>Anwendung bei</b>
P 6 Einzelfrequenz 24 Hz	+ Tonisierung	+ Narbenbehandlung + Entspannung + Meridianbehandlung
P 7 Einzelfrequenz 28 Hz	+ Tonisierung + Schmerzlinderung	+Anregung allgemein,
P 8 Breitbandiges Frequenzspektrum 14-22-14 Hz	+ Detonisierung u. allgemeine Entspannung	+ Behandlung von Reflexpunkten Akupunkturpunkte + Segmentbehandlung an Faszien
P 9 Frequenzfolge 23-32 Hz	+ + Anregung des Gefäßdurchflusses	+ Triggerpoints + Atrophie

### Frei wählbare Frequenzen

<b>Programm</b>	<b>Wirkung</b>	<b>Anwendung bei</b>
8 Hz – 13 Hz	+ Lymphabfluß + Entsorgung der Stoffwechselprodukte + Aktivierung der Matrix	+ Ödeme nach Operation und Traumen
14 Hz – 22 Hz	+ Detonisierung, Entspannung	+ Dehnung von Muskeln, Sehnen, Gefäßen und Nerven + Lösen von Verklebungen
23 Hz – 32 Hz	+ Tonicierung, Hyperämie	+ Schmerzlinderung + Narben, Kontraktoren + Gelenkmobilisation + Kraftaufbau, Koordination