

Programm	Wirkung	Anwendung bei
P1 Einzelfrequenz 10 Hz	+ Lymphabfluss + Anregung der Matrix	+ Grundprogramm zum Ausleiten + Ödem, nach Operation und Trauma
P2 Breitbandiges Frequenzspektrum 8 - 12 - 8 Hz	+ Endsorgung der Stoffwechselprodukte + Förderung des venösen Abflusses + Aktivierung der Matrix	+ entzündliche Erkrankungen allgemein + Schmerzen im Muskel-, Nerv-, Bindegewebe und Gelenkapparat + postoperative und posttraumatische Zustände des Bewegungssystems
P3 Einzelfrequenz 18 Hz	+ Förderung des arteriellen Zuflusses + Stoffwechselaktivierung	+ Gelenkmobilisation + Behandlung von Kontrakturen
P4 Breitbandiges Frequenzspektrum 18 - 24 - 18 Hz	+ Detonisierung der Gewebespannung von Haut, Muskeln, Sehnen und Nerven + Ausleitung von Stoffwechselprodukten	+ Dehnung von Muskeln, Sehnen, Gefäßen und Nerven + Lösen von Verklebungen, Muskelverspannungen, Myotendinosen + Behandlung an Triggerpunkten + Narben + Muskelverletzungen
P5 Frequenzfolge 24 - 28 Hz	+ Tonisierung + Schmerzlinderung + Mobilisierung und Vergrößerung des Bewegungsraumes (z.B. Schrittlänge) + Aufbau und Steigerung der Muskelkraft + Optimierung des nervalen Reizsystems	+ Mobilisation von Gelenken + Verbesserung der Koordination und Kraftaufbau + Verbesserung von muskulären u. athrogenen Dysbalancen + zentrale und periphere Phasen + Lähmungen + Verbesserung der Koordinationsfähigkeit

NeuroStim® M21/PRO/C21**PROGRAMÜBERSICHT UND BEHANDLUNGSBEISPIELE**

Programm	Wirkung	Anwendung bei
P6 Einzelfrequenz 24 Hz	+ Tonisierung	+ Narbenbehandlung + Entspannung + Meridianbehandlung
P7 Einzelfrequenz 28 Hz	+ Tonisierung + Schmerzlinderung	+ Anregung allgemein
P8 Breitbandiges Frequenzspektrum 14 - 22 - 14 Hz	+ Detonierung und allgemeine Entspannung	+ Behandlung v. Reflex- punkten, Akupunktur- punkte + Segmentbehandlung von Faszien
P9 Frequenzfolge 23 - 32 Hz	+ Anregung des Gefäß- durchflusses	+ Triggerpunkte + Atrophie

Frei wählbare Frequenzen

Programm	Wirkung	Anwendung bei
8 Hz - 13 Hz	+ Lymphabfluss + Entsorgung der Stoffwechselprodukte + Aktivierung der Matrix	+ Ödeme nach Operation und Traumen
14 Hz - 22 Hz	+ Detonisierung + Entspannung	+ Dehnung von Muskeln, Sehnen, Gefäßen und Nerven + Lösen von Verklebungen
23 Hz - 32 Hz	+ Tonisierung, Hyperämie	+ Schmerzlinderung + Narben, Kontrakturen + Gelenkmobilisation + Kraftaufbau, Koordination